



villevie

obturador provisório

FLÚOR

Peso Líquido 25g

USO PROFISSIONAL

Modo de usar:

Inserir o Obturador Provisório Villevie na quantidade adequada ao local a ser aplicado. O local deverá estar isento de umidade no momento da aplicação, evitando o deslocamento do curativo. Tem cura (endurecimento) entre 15 e 30 minutos e fácil remoção, sem uso de brocas ou outro instrumento especial.

Armazenamento: Manter em lugar seco e fresco, abrigado da luz.

Indicação e finalidade:

Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores e endodônticos, prevenindo contaminações.

Precauções/contraindicações: Não utilizar como restaurador definitivo.

Composição:

Óxido de zinco, sulfato de cálcio, óxido de ferro vermelho, espessante, fluoreto de sódio, sulfato de zinco, óleo de silicone, aromatizante e gesso ortodôntico.

Não contém eugenol.

Reg. M.S. 10344110003

Quím. Resp. aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13 R



Validade 24 meses
Data de fabricação e lote
vide fundo do pote.
Dentalville do Brasil LTDA
CNPJ 01.101.363/0001-86
R. Adv. Miguel Cercal, 645
CEP 89214-610 - Joinville-SC
Fone: (47) 3454-2200
fale@villevie.com
www.villevie.com
INDÚSTRIA BRASILEIRA