

Armazenamento e Transporte:

Armazenar na embalagem original bem fechada, em local seco, ao abrigo da luz solar, em temperaturas entre 15°C e 30°C.

Lote e data de fabricação vide tampa.

Validade: 2 anos

Fabricado por:

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

Rua Advogado Miguel Cercal, 645

Nova Brasília - Joinville - SC - 89.214-610

Resp. Técnico: Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13ªR

Reg. ANVISA: 10344110015

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fone/Fax: (47) 3454-2200

fale@villevie.com – www.villevie.com



Bicarbonato de Sódio

Removedor Mecânico de Placa Dentária

Uso Profissional

200g



Descrição do Produto: O Bicarbonato de Sódio é um pó fino branco, cristalino, inodoro, solúvel em água. **Indicação:** O Bicarbonato de Sódio é utilizado para realização de profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana. Indicado para uso em equipamentos de jateamento onde, através da ação mecânica do jato sob pressão que mistura o bicarbonato de sódio, água e ar, é possível eliminar materiais orgânicos promovendo a limpeza dos dentes, com retirada da placa bacteriana. **Orientações ao Cirurgião-Dentista:** Este produto pode ser utilizado em qualquer equipamento de jateamento, observando atentamente as orientações de cada fabricante. Mantenha frasco do produto sempre bem fechado. **Instruções de Uso:** 1) Agite o frasco antes de usar. 2) Higienize o reservatório do equipamento e abasteça com o Bicarbonato de Sódio, seguindo as recomendações do fabricante do equipamento de jateamento. 3) Realize a profilaxia por jateamento, conforme orientação do fabricante do equipamento. **Composição:** Bicarbonato de Sódio. **Contra-Indicações:** Este produto é contra-indicado para pacientes com doença periodontal, com exposição radicular e de dentina. Também é contra-indicado à pacientes com alterações respiratórias, com complicações renais ou que se submetem à hemodiálise e pacientes com sensibilidade aos componentes da fórmula.

Advertências e Preocupações: Evitar o contato com pele e olhos, não ingerir, não inalar. Não utilizar com prazo de validade vencido ou caso a embalagem esteja violada. Manter o produto longe do alcance de crianças. Uso exclusivo do cirurgião dentista. Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos e procurar orientação médica.

Manuseio do Produto: Recomenda-se ao profissional o uso de óculos de proteção, luvas e máscara. Para o paciente recomenda-se o uso de óculos de proteção.