

**CONTRA-INDICAÇÕES:**

Contra-indicado a pessoas com sensibilidade aos componentes da fórmula.

**PRECAUÇÕES:**

Evitar a ingestão do produto. Não reutilizar. Uso exclusivo do cirurgião dentista. Carregar a moldeira em local distante do paciente. Colocar o paciente em posição vertical, diminuindo risco de deglutição. Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância por 15 minutos e procurar orientação médica. Em caso de reação alérgica, suspenda o uso.

**ADVERTÊNCIAS:**

Manter o produto longe do alcance de crianças. Não utilizar com prazo de validade vencido ou caso a embalagem esteja violada.

**MANUSEIO DO PRODUTO:**

Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção durante o manuseio do produto. Para descarte do produto siga a legislação de seu país.

**ARMAZENAMENTO:**

Armazenar em local fresco, com embalagem bem fechada, em temperaturas entre 15°- 30°C

**Validade:** 24 meses

**Fabricado por:**

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

Rua Advogado Miguel Cercal, 645

Nova Brasília – Joinville – SC – 89.214-610

Resp. Técnico: Aldo Castellani - CRQ-SC 13.400.397 13°R

Reg. ANVISA: 10344119003

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fone/Fax: (47) 3454-2200


contato@villevie.com - www.villevie.com



Fab.: / Lote:

# Flúor Dent

## Espuma Fluoretada

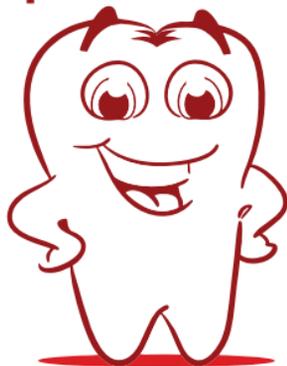

**Neutro**

**Sabor Framboesa**

**Uso Profissional**

**Conteúdo: 100g**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Solução aquosa, contendo fluoreto de sódio, para aplicação tópica na forma de espuma. Devido sua forma de apresentação em espuma, o produto apresenta menor risco de ingestão acidental e intoxicação, visto que é usado em menor quantidade por possuir baixa densidade.

**INDICAÇÃO:**

Indicado para fluoretação do esmalte dental na prevenção e profilaxia de cáries. Também pode ser utilizado em pacientes portadores de necessidades especiais e ortodônticas, pacientes submetidos à raspagem periodontal e casos de hipersensibilidade dentinária. Uso profissional, exclusivo odontológico.

**MECANISMO DE AÇÃO:**

As bactérias que provocam a cárie enfraquecem e desmineralizam a estrutura dental. A aplicação tópica de flúor, por sua vez, acelera o processo de remineralização do esmalte, por suprir a perda de fluoreto.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- Recomenda-se a profilaxia dos dentes previamente à aplicação, ou conforme o caso.
- Manter o frasco na posição vertical e pressionar a válvula de liberação. Preencher 1/3 do volume da moldeira com a espuma fluoretada.
- Secar bem a superfície dos dentes e introduzir a moldeira na boca do paciente. O paciente deverá morder sobre a moldeira para mergulhar os dentes na espuma.
- Deixar o produto agindo por 1 minuto.
- Retirar a moldeira e instruir o paciente a expelir o excesso do produto. Não enxaguar a boca após aplicação.
- Solicitar ao paciente que evite comer ou beber durante os próximos 30 minutos seguintes a aplicação.

**COMPOSIÇÃO:**

Fluoreto de sódio 1,23%, tensoativo, estabilizador de espuma, edulcorante, conservante, aromatizante e água purificada.

