

sensis 0,2%

Gel para Sensibilidade Dental
Fluoreto de Sódio 0,2%
Nitrato de Potássio 5%

VAL: 24 MESES

Indicado para casos onde ocorra de baixa a moderada sensibilidade, devido a hipersensibilidade dentinária ou decorrente de clareamento dental.

- Modo de Usar:**
1. Aplicar o gel SENSIS 0,2% nos dentes sensíveis, diretamente com ponteira aplicadora da seringa.
 2. Friccionar o gel sobre os dentes com cotonete ou escova dental extra macia e deixar agir por um período de 5 a 10 minutos.
 3. Após o término da aplicação, retire o gel dos dentes usando algodão e água abundantemente.
 4. Caso a causa da sensibilidade seja decorrente de clareamento dental pode-se aplicar o gel na própria moldeira de clareamento, do mesmo modo que se aplica o clareador de uso caseiro durante 5 a 10 minutos (antes, durante e/ou depois do tratamento), ou conforme orientação do cirurgião-dentista.
 5. Sempre que necessário, repita a aplicação do dessensibilizante, persistindo a sensibilidade procure orientação de seu cirurgião-dentista.

Precauções e Contra-Indicações:

- Não ingerir o produto.
- Contra-indicado para pessoas com sensibilidade aos componentes da fórmula.

Composição: Nitrato de Potássio 5%, Fluoreto de Sódio 0,2%, espessante, aromatizante, conservante e água purificada.



Fabricado por:

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

Rua Advogado Miguel Cercal, 645

Nova Brasília - Joinville - SC - 89214-610

Resp. Técnico: Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13 R

Reg. ANVISA: 10344110008

Fone/Fax: (47) 3454-2200

contato@villevie.com-www.villevie.com

