

# acid gel

CONDICIONADOR  
DENTAL

Condicionador ácido Villevie, ideal para o uso clínico por apresentar uma racional forma de aplicação, viscosidade adequada para fluir na quantidade desejável, sem apresentar escoamento para áreas indesejáveis, solúvel em água devido à sua formulação especial.

## Modo de usar:

1. Prepare a região a ser condicionada limpando e secando-a.
2. Aplique o condicionador ácido por 15 segundos (esmalte e dentina), ou durante o tempo determinado pelo fabricante do agente adesivo ou de outro produto a ser aplicado após o condicionamento.
3. Lave com abundância.
4. Secar a dentina com uma bolinha de algodão ou papel absorvente e o esmalte com jato de ar.

**Precauções:** Todos os produtos a base de ácido fosfórico não deverão ter contato com tecidos bucais, olhos e pele. Ocorrendo o contato acidental lavar a área afetada em água abundante. Persistindo a irritação, procurar orientação médica.

**Nota:** Fica advertido que se o esmalte possuir um grau variável de fluorose, amelogênese imperfeita, má higiene da área, falta de isolamento do quadro, óleo no ar do equipamento odontológico ou má secagem, poderá haver fracasso total ou parcial do condicionamento ácido.

**Armazenamento:** Manter em lugar seco e fresco, abrigado da luz.

**Obs:** \* Este produto também pode ser utilizado na técnica de microabrasão do esmalte dentário associado à pedra pomes

**Composição:** Ácido Fosfórico, espessante, umectante, água purificada e corante.



Fabricado por:

DENTALVILLE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 01.101.363/0001-86

Rua Advogado Miguel Cercal, 645

Nova Brasília - Joinville - SC - 89214-610

Resp. Técnico: Aldo Castellani

CRQ-SC 13.400.397 13ºR

Reg. ANVISA: 10344110001

Fone: (47) 3454-2200

fabrica@villevie.com - www.villevie.com

